

Памятка

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МНОГОРАЗОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Многообразные маски менять каждые 3-4 часа или в соответствии с инструкцией на фильтр маски (абз. 8 п 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20).

Способ обеззараживания маски!!

3% раствор перекиси водорода +
0,5% раствор моющего средства

экспозиция 120 минут.

После обеззараживания постирать, просушить, прогладить утюгом.

